

ESPETCAGE®

Pro Intelligent

Pro Intelligent Wi-Fi Kamera Kurulumu

ESPY ASİSTAN İLE ADIM ADIM KURULUM



Merhaba, ben ESPY.

ESPETCAGE Pro Intelligent serisinin dijital asistanıyım.

Bu videoda, yoğun bakım ünitenizle birlikte sunulan **Wi-Fi kameranın** kurulumunu adım adım birlikte gerçekleştireceğiz.



Kurulumu başlamadan önce telefonunuzun kliniğinizde kullandığınız **Wi-Fi** ağına bağlı olduğundan ve yoğun bakım ünitenizin **enerji bağlantısının açık** olduğundan emin olunuz.



Wi-Fi
Bağlantısı



Canlı
İzleme



Kayıt ve Geri
İzleme



Anlık
Bildirim



Güvenli ve
Şifreli Bağlantı

ESPETCAGE®

Pro Intelligent

Pro Intelligent Wi-Fi Kamera Kurulumu

ADIM 1

V380 Pro Uygulamasını İndirin

Kamera görüntülerinize **her zaman, her yerden**
kolayca erişmek için ilk adımı atıyoruz.



*Hemen
İndirin!*



ÜCRETSİZ
İndirin, hemen
kullanmaya



V380 Pro

Akıllı Kamera
Uygulaması

- ✓ Canlı izleme
- ✓ Kayıt ve geri izleme
- ✓ Hareket algılama bildirimi
- ✓ Uzaktan erişim desteği
- ✓ Klinik içi güvenli bağlantı



Uygulama kurulumu tamamlandıktan sonra
hesap oluşturma adımına geçeceğiz.



Güvenli. Akıllı. Her Zaman Yanınızda.



Pro Intelligent Wi-Fi Kamera Kurulumu



3 Hesap Oluşturma ve Bölge Seçimi (Türkiye → Asya)


Uygulamayı açtıktan sonra kayıt olarak hesabınızı oluşturacağız ve Türkiye için bölge seçimini yapacağız.

1 Uygulamayı Açın




Uygulamayı açın ve “Kayıt olmak” seçeneğine dokununuz.

2 Kayıt Yöntemini Seçin

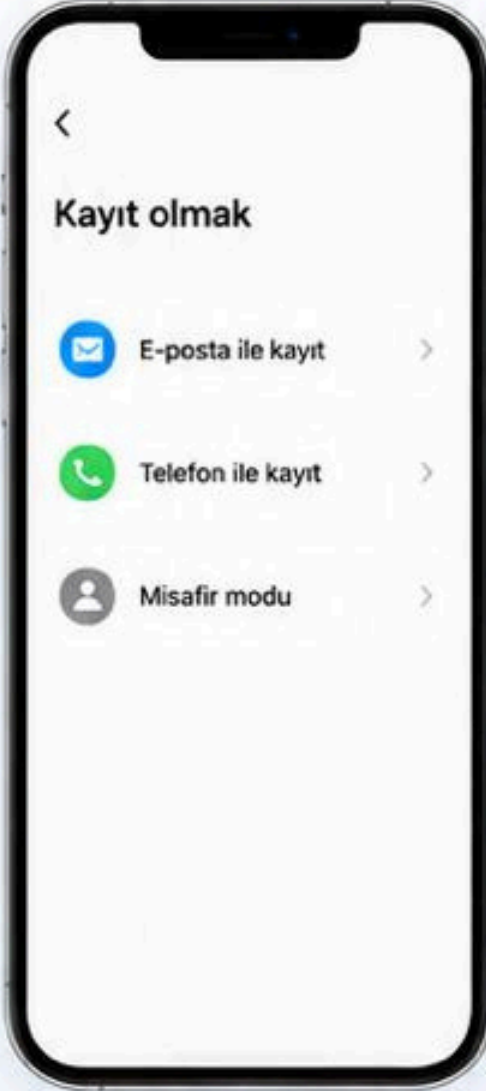

“E-posta ile kayıt” seçeneğini seçerek ilerleyin.

3 Bölge Seçimi

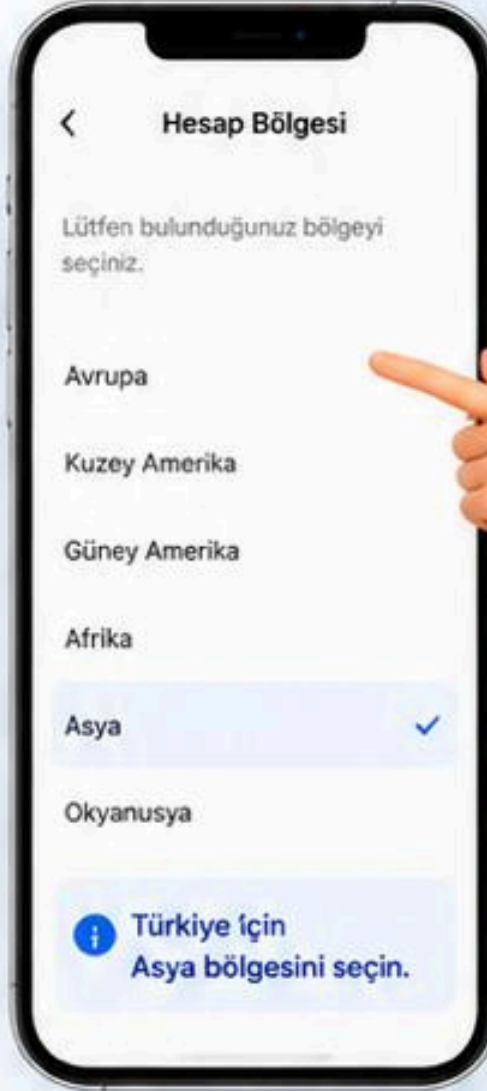

Türkiye’de kullanım için hesap bölgesi olarak “Asya” seçin.



Bölge seçimi, kameranızın doğru sunucu üzerinden çalışması için önemlidir. Bu nedenle Türkiye için “Asya” seçimini yapmanız gerekmektedir.

Bu Adımda Ne Yaptık?



Kayıt Ol

Uygulamayı açarak “Kayıt olmak” seçeneğine dokunduk.



E-posta ile Kayıt

Kayıt yöntemi olarak “E-posta ile kayıt” seçeneğini seçtik.



Bölge Seçimi

Türkiye için doğru bölge olarak “Asya” seçimini gerçekleştirdik.



Kayıt işlemi için aktif bir e-posta adresine ihtiyacınız olacaktır. Doğrulama kodu bu e-posta adresine gönderilecektir.



Sıradaki Adım: E-posta Doğrulama ve Şifre Oluşturma





Pro Intelligent Wi-Fi Kamera Kurulumu

4 E-posta Doğrulama Kodu ve Şifre Oluşturma

E-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girin ve güçlü bir şifre oluşturarak kayıt işlemini tamamlayın.

1 Doğrulama Kodu Gönderildi

2 Doğrulama Kodunu Girin

3 Güçlü Şifre Oluşturun

< E-posta ile kayıt

Doğrulama kodu gönderildi

E-posta adresiniz:
vetaklinik@gmail.com

Doğrulama kodu e-posta adresinize
5 dakika içinde ulaşacaktır.
Gelen kutunuzu kontrol edin.

Kodu Aldım

< E-posta Doğrulama

vetaklinik@gmail.com adresine
gönderilen 6 haneli doğrulama kodunu
girin.

1 2 3 4 5 6

Kodunuzu almadınız mı?
[Tekrar Gönder \(52s\)](#)

1 2 3
4 5 6
7 8 9
0

< Şifre Oluştur

Hesabınız için güçlü bir şifre
belirleyin.

Şifre

Şifreyi tekrar girin

Şifre gereksinimleri:

- 8-32 karakter arasında olmalı
- En az 1 büyük harf içermeli
- En az 1 küçük harf içermeli
- En az 1 rakam içermeli
- En az 1 özel karakter içermeli

Tamam



Güvenli Şifre Önerisi

Kişisel bilgilerinizi korumak için
kolay tahmin edilemeyen,
güçlü bir şifre oluşturun.

E-posta Doğrulama Neden Önemli?



Hesap Doğrulama

E-posta doğrulama, hesabınızın
size ait olduğunu onaylar.



Güvenlik

Şifre sıfırlama ve hesap
güvenliği için gereklidir.



Kesintisiz Erişim

Doğrulanmış hesap ile tüm
özelliklere kesintisiz erişin.



Dikkat!

- Doğrulama kodu 5 dakika geçerlidir.
- Kodu almazsanız "Tekrar Gönder" seçeneğini kullanın.
- E-posta adresinizi doğru girdiğinizden emin olun.



Sıradaki Adım:

Wi-Fi Bağlantı Ayarları ve Kamera Ekleme



Pro Intelligent Wi-Fi Kamera Kurulumu



5 Kamera Ekleme ve AP Erişim Noktasına Bağlanma


Kameranızı uygulamaya eklemek için aşağıdaki adımları takip edin.

1 Uygulamada "+"
butonuna dokununuz.

2 "AP Erişim Noktası"
Kurulumu" seçeneğini
seçin.

3 Kameranin sesli
yönlendirmesini
dinleyin.

4 Telefonunuzun Wi-Fi
ayarlarından kameranızın
ağını seçin.

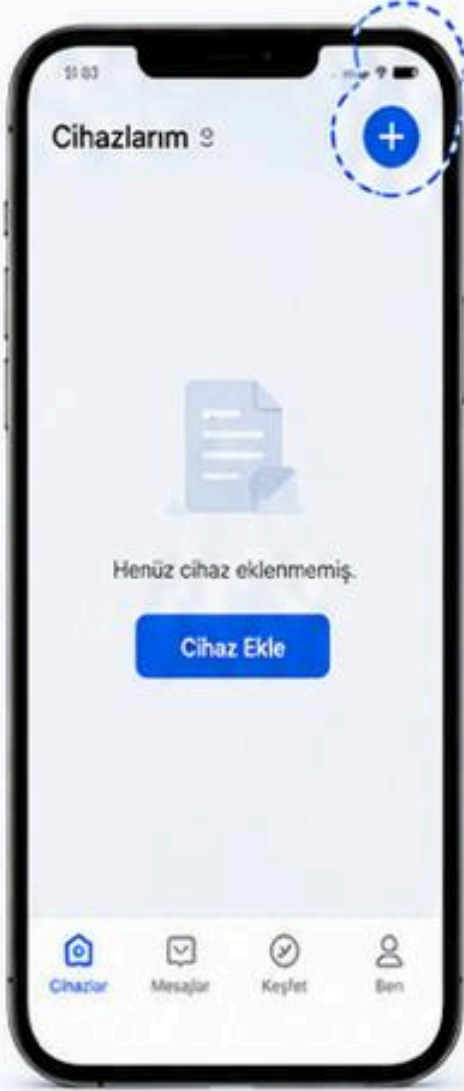

"AP hotspots'u
başlatılıyor

Lütfen cep telefonunuzun
ayarlarından AP noktasını
bağlayın"



Kamera ilk açıldığında kendi Wi-Fi ağını oluşturur.



Bu ağ genellikle HSC_XXXXXX şeklinde görünür.



Bir sonraki adımda telefonumuzu bu ağa bağlayacağız.

Kameranızın AP Ağı Görünmüyorsa?



Kamerayı Yeniden Başlatın
Kamerayı kapatıp 20 saniye
bekledikten sonra tekrar
açın.



Sesli Yönlendirmeyi Dinleyin
Kameranin "AP hotspots'u
başlatılıyor" sesli uyarısını
duyduğunuzdan emin olun.



Telefonunuzu Kontrol Edin
Mobil veriyi kapatın ve yalnızca
Wi-Fi'nin açık olduğundan emin
olun.



Önemli Bilgi

Bu bağlantı internet erişimi sağlamaz.
Sadece kamera ile eşleşme için kullanılır.



Kurulum Süresi: Yaklaşık 3 - 4 Dakika

Sonraki Adım:

HSC ağına bağlanma ve sesli kodun girilmesi



Pro Intelligent Wi-Fi Kamera Kurulumu



6 Kliniğin Wi-Fi Bilgilerini Girme

Kameranızı kliniğinizin 2.4 GHz Wi-Fi ağına bağlamak için Wi-Fi adını (SSID) seçin ve şifresini girin.

1 Wi-Fi Ağını Seçin

Kliniğinizin 2.4 GHz Wi-Fi ağını listeden seçin.

2 Wi-Fi Şifrenizi Girin

Kliniğinizin Wi-Fi şifresini doğru şekilde girin.

3 Bağlantı Bilgilerini Onaylayın

Wi-Fi adı ve şifrenizi kontrol edin, ardından "Onayla"ya dokununuz.

4 Kameraya Bilgiler Gönderiliyor

Uygulama, Wi-Fi bilgilerini kameraya gönderecektir. Lütfen bekleyin.

5 Hazırlık Tamamlandı

Hazırlık tamamlandıktan sonra telefonunuzu kameranın Wi-Fi ağına bağlayacağız.



Önemli Bilgiler

- ✓ Kameramız yalnızca 2.4 GHz Wi-Fi ağlarını destekler. 5 GHz ağlar görünmez.
- ✓ Wi-Fi şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun. Şifre hataları bağlantı kurulamamasına neden olur.
- ✓ İnternet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun.
- ✓ Bilgiler gönderildikten sonra bir sonraki adımda telefonumuzu HSC_XXXXXX ağına bağlayacağız.

Desteklenen Ağ

2.4 GHz

Desteklenmeyen Ağ

5 GHz

Neden 2.4 GHz?

Kameralarımız daha uzun menzil ve daha stabil bağlantı için 2.4 GHz frekans bandı ile Bu nedenle lütfen 2.4 GHz Wi-Fi ağını kullanın.



Bilmeniz Gerekenler



Doğru Şifre

Wi-Fi şifrenizi doğru girdiğinizden emin olun.



Gizli Ağlar

Gizli (saklı) Wi-Fi ağları desteklenmeyebilir.



Bağlantı Sorunları

Sorun yaşarsanız modemini yeniden başlatmayı deneyin.



Sıradaki Adım:

Telefonu HSC_XXXXXX ağına bağlama ve 4 haneli sesli kodu girme





Kameradan duyduğunuz 4 haneli kodu girerek cihazınız ile doğru eşleştirmeyi doğrulayın.



KAMERADAN GELEN SESLİ UYARI



"Bağlantı için kodunuz:
Bir, İki, Üç, Dört"



BİRDEN FAZLA YOĞUN BAKIM ÜNİTENİZ VARSA DİKKAT!

Kurulum sırasında yalnızca bağlayacağınız cihaza açık olsun. Diğer cihazları geçici olarak kapatmanız önerilir.



Diğer cihazların açık olması durumunda uygulama farklı bir kameraya bağlanmaya çalışabilir ve kurulum süreci karışıklığa neden olabilir.



1

HSC Ağına Bağlan



Telefonunuzu kameranın oluşturduğu HSC_XXXXXX ağına bağlayın.

2

Koda Dikkat Edin



"Bir, iki,
Üç, Dört"

Kameradan okunan 4 haneli kodu dikkatlice dinleyin.

3

Kodu Girin



Duyduğunuz 4 haneli kodu ekrandaki alana girin.

4

Eşleştirme Tamamlandı



Kod doğru girildiğinde kamera ile telefon arasında eşleştirme tamamlanır.

5

Bir Sornaki Adım



Kamera kliniğinizin Wi-Fi ağına bağlanma aşamasına geçecektir.



ÖNEMLİ BİLGİLER

- ✓ Kod her kamerada farklıdır.
- ✓ Kodu doğru girdiğinizden emin olun.
- ✓ Bu işlem sırasında uygulamayı kapatmayın.
- ✓ Bağlantı tamamlanana kadar lütfen bekleyin.



Sonraki Adım:

Klinik Wi-Fi ağınıza bağlanması için sistem kameraya gönderdiğiniz bilgileri işliyor. Lütfen bekleyiniz...





Kliniğinizin Wi-Fi bilgileri kameraya aktarılmıştır.
Sistem bağlantıyı doğruluyor ve kameranızı
internete bağlamaya çalışıyor.

Lütfen uygulamayı kapatmadan birkaç dákika bekleyiniz.



Bu sırada:



Uygulamayı
kapatmayın



Kameranın
enerjisini
kesmeyin



Telefonun Wi-Fi
bağlantısını
değıştirmeyin



İşlem tamamlanana
kadar bekleyin



Telefon



Kamera



Modem / Router



İnternet

Bağlantı kuruluyor...



Önemli Not

Bu işlem internet hızınıza ve ağ yoğunluğuna bağlı olarak 1-2 dakika sürebilir.
Lütfen sabırlı olun.



V380 Pro




ESPETCAGE
Pro Intelligent Series

Kurulum tamamlanana kadar lütfen bekleyiniz...





Kameranız başarıyla kurulmuş ve internete bağlanmıştır.
Artık kameranızı dilediğiniz yerden izleyebilir, takip edebilirsiniz.

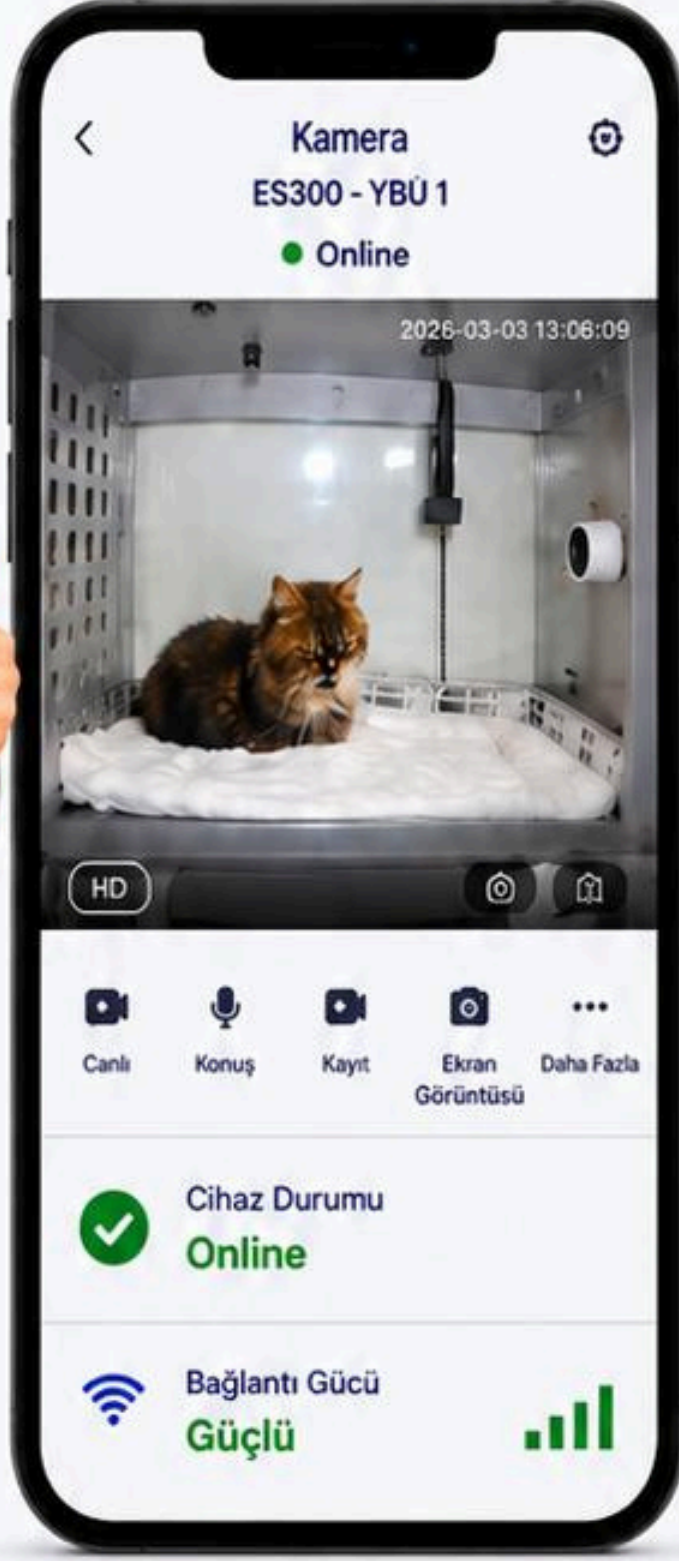

KAYIT ALMA SEÇENEKLERİ



Bulut Kayıt (Cloud)

V380 Pro uygulaması üzerinden bulut hizmeti satın alarak kayıt alabilirsiniz.



SD Kart Kayıt

Kamera üzerindeki SD kart yuvasına takacağınız SD kart ile kayıt alabilirsiniz.

Not: SD kart ayrıca satılır.

Kesintisiz kayıt için SD kartınızın düzenli olarak çalıştığından emin olunuz.



GECE GÖRÜŞÜ ÖNERİSİ

Kameranız güçlü gece görüş özelliğine sahiptir. Daha net ve kaliteli görüntü almak için:

- ✓ Kamera ayarlarından Gece Görüşü modunu AKTİF edin.
- ✓ Yoğun bakım kabininin aydınlatmasını kapatmanızı öneririz.

Özellikle ES300 Pro Intelligent modelinde kamera, iç aydınlatmaya yakın konumlandığı için gece saatlerinde aydınlatma açıkken görüntüde çizgisel parlamalar oluşabilir.

Daha net görüntü için gece görüş modunu kullanın ve aydınlatmayı kapatın.



Aydınlatma Açık
(Çizgisel Parlama)



Gece Görüşü Aktif
(Ilık Kapalı)

Wi-Fi KOPMASI veya Wi-Fi ŞİFRESİ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA

Kameranızı resetleyerek kurulumu yeniden yapmanız gerekir. Cihazla birlikte gönderilen reset çubuğunu kullanınız.



RESET

Reset Deliği
(Ön Yüzde)

1



Reset çubuğunu (paket içeriğinden çıkar) reset deliğine takın.

2



3 saniye boyunca tıklayıp basılı tutun.

3



Kamera "Reset başarılı, lütfen bekleyin" anonsu yapacaktır.

4



60-90sn

Yaklaşık 1-1,5 dakika bekleyin.



Kamera yeniden başladığında sesli yönlendirme ile AP moduna geçecektir. Ardından kurulumu baştan yaparak kameranızı tekrar bağlayabilirsiniz.




Her Yerden İzleyin!

Kameranızı dilediğiniz yerden güvenle izleyin.



Cep Telefonu

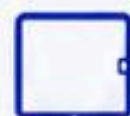

Tablet



Bilgisayar



YARDIM için

0850 308 88 67
destek@espetcage.com
www.espetcage.com



ESPETCAGE
Pro Intelligent Series

Kameranızla ilgili her konuda yanınızdayız.

